

Navodila za uporabo
GENTLEmini 5000 B - REF 1.002.3300



KaVo. Dental Excellence.

Distribucija:

KaVo Dental GmbH

Bismarckring 39

D-88400 Biberach

Tel. +49 7351 56-0

Telefaks +49 7351 56-1488

Proizvajalec:

Kaltenbach & Voigt GmbH

Bismarckring 39

D-88400 Biberach

www.kavo.com



Kazalo

Kazalo	1
Napotki za uporabnike	5
Garancijska določila	7
Varnost	9
Opis varnostnih napotkov	9
Namembnost – uporaba v skladu z določili	11
Varnostna navodila	13
Opis izdelka	17
Tehnični podatki	18
Pogoji za transport in shranjevanje	19
Zagon	20
Montaža MULTIflex priključka	21

Preverite količino vode	22
Preverite tlake	23
Preverjanje O-obročev	25
Uporaba	26
Namestite medicinski izdelek	27
Izvlek medicinskega izdelka	29
Vstavite frezalna orodja ali diamantne bruse	30
Odstranite frezalna orodja ali diamantne bruse	33
Odpravljanje motenj	35
Zamenjajte O-obroče na spojki na napajalni cevi	35
Čiščenje pršilne šobe	36
Menjava vodnega filtra	38
Metode priprave v skladu s standardom DIN EN ISO 17664	39
Predpriprava na mestu uporabe	39




Čiščenje	41
Čiščenje: Ročno zunanje čiščenje	42
Čiščenje: Ročno notranje čiščenje	43
Čiščenje: Strojno zunanje in notranje čiščenje	44
Razkuževanje	45
Razkuževanje: Ročno zunanje razkuževanje	46
Razkuževanje: Ročno notranje razkuževanje	48
Razkuževanje: Strojno zunanje in notranje razkuževanje	49
Sušenje	50
Sredstva za vzdrževanje in sistemi za vzdrževanje - Vzdrževanje	52
Sredstva za vzdrževanje in sistemi za vzdrževanje - Vzdrževanje: Nega s KAVOspray-em	54
Sredstva za vzdrževanje in sistemi za vzdrževanje - Vzdrževanje: Nega s KaVo SPAYrotorjem	56
Sredstva za vzdrževanje in sistemi za vzdrževanje - Vzdrževanje: Vzdrževanje s KaVo QUATTROcare	57
Ovojnina	59
Sterilizacija	60
Shranjevanje	62




Pribor	63
---------------------	-----------

Napotki za uporabnike

Spoštovani uporabnik,
KaVo vam želi z vašim novim kakovostnim izdelkom veliko veselja. Da bi lahko z njo delali brez okvar, gospodarno in varno, prosimo, upoštevajte napotke v nadaljevanju.

© Avtorske pravice KaVo Dental GmbH

	Glejte poglavje Varnost/opozorilni simbol
	Pomembna informacija za uporabnike in tehnike
	Razkuževanje s toplotnimi metodami je mogoče

	Parna sterilizacija do 135 °C (275 °F)
	Znak CE (Communauté Européenne). Izdelek s to oznako odgovarja zahtevam uporabne EU-direktive.
	Poziv k opravi

Ciljna skupina

Ta dokument je namenjen zobozdravnicam in zobozdravnikom ter zobnim asistentkam oz. asistentom. Poglavje o zagonu je predvideno za serviserje.

Garancijska določila

Za ta KaVo medicinski izdelek veljajo naslednji garancijski pogoji:

Družba KaVo prevzema garancijo, ki velja za končno stranko, za izdelek za neoporečno delovanje in brezhibnost v materialu ali obdelavi v trajanju 24 mesecev od datuma nakupa pod naslednjimi pogoji:

Ob upravičenih zahtevkih podjetje KaVo v okviru uveljavljanja garancije brezplačno dostavi nov izdelek ali nudi brezplačno popravilo. Pravice katerekoli vrste, še posebej zaradi poškodb, so izključene. V primerih velikih zaostankov, krivega ravnanja ali namernega oškodovanja, slednje velja le, če ni v nasprotju z brezpogojnimi zakonskimi predpisi.

Družba KaVo ne jamči za poškodbe in posledice le-teh, ki bi nastale zaradi naravne obrabe, neprimerne čiščenja ali vzdrževanja, neupoštevanja predpisov glede uporabe, oskrbovanja ali priključevanja, nabiranjem vodnega kamna ali korozijo, nečistoč v oskrbovalnem zraku ali vodi in kemičnih oziroma električnih vplivov, ki so nenavadni ali nedopustni glede na siceršnja navodila proizvajalca. Garancija splošno ne velja za luči, steklene

optične vodnike oziroma optične vodnike s steklenimi vlakni, steklovino, gumijaste dele in za barvno obstojnost delov iz umetne mase.

Jamstvo je izključeno v primerih poškodb ali njihovih posledic, ki temeljijo na posegih v izdelek ali njegovih spremembah, opravljenih s strani kupca ali tretjih oseb brez pooblastila podjetja KaVo.

Garancijske pravice lahko uveljavljate le, če predložite potrdilo o nakupu v obliki kopije računa/dobavnice. Na slednjem morajo biti jasno vidni podatki trgovca, datum nakupa, številka ali tip naprave in tovarniška ali serijska številka.

Opis varnostnih napotkov



Opozorilni simbol



NEVARNOST

Struktura

V uvodu je opisana vrsta in vir nevarnosti.

Ta razdelek opisuje posledice, ki so možne ob neupoštevanju.

- ▶ Korak, ki je na izbiro, obsega ukrepe, ki so potrebni za izogib nevarnostim.

Opis stopenj nevarnosti

Varnostna navodila skupaj s tremi stopnjami ogroženosti v tem dokumentu so namenjena za izogibanje materialni škodi in poškodbam.



PREVIDNO

PREVIDNO

opisuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči materialno škodo ali lahke do zmerne poškodbe.



OPOZORILO

OPOZORILO

opisuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči težke ali smrtne poškodbe.



NEVARNOST

NEVARNOST

opisuje največjo nevarnost zaradi določene situacije, ki lahko povzroči takojšnje težke ali smrtne poškodbe.

Namembnost – uporaba v skladu z določili

Ta medicinski izdelek je

- predviden samo za zobozdravstveno zdravljenje. Kakršenkoli drugačen način uporabe ali predelava izdelka nista dopustna in lahko povzročita nevarnost. Ta medicinski izdelek je predviden samo za naslednjo uporabo: Odstranjevanje karioznega materiala, kavitacijskih in kronskih preparatov, odstranjevanje polnitev, obdelava površine zobnih in restavracijskih površin.
- medicinski izdelek po ustreznih nacionalnih zakonskih predpisih.

Po teh predpisih je dovoljeno medicinski izdelek uporabljati strokovno usposobljenim osebam le za opisano uporabo. Pri tem je treba upoštevati:

- veljavne predpise za varstvo pri delu
- veljavne ukrepe za preprečevanje nesreč
- to navodilo za uporabo

Po teh predpisih je obveza uporabnika, da:

-
- uporablja le brezhibna delovna sredstva.
 - pazi na pravilen namen uporabe,
 - - ščiti sebe, bolnike in ostale pred nevarnostmi,
 - prepreči kontaminacijo z izdelkom.



PREVIDNO



PREVIDNO



Varnostna navodila

Predčasna obraba in motnje delovanja zaradi neustreznega skladiščenja pred daljšimi neuporabami.

Skrajšana življenjska doba izdelka.

- ▶ Pred daljšimi premori uporabe je potrebno medicinske izdelke skladiščiti očiščene, negovane in suhe v skladu z navodili.

Telesne poškodbe ali škoda zaradi obrabe.

Hrup zaradi nepravilnega teka, močne vibracije, pregretje, neuravnoveženost ali premajhna sila zadrževanja.

- ▶ Ne delajte naprej in pokličite servis.

Navodilo

Zaradi varnostno-tehničnih razlogov priporočamo, da po izteku garancijskega časa letno preverjate sistem nosilcev orodij.



PREVIDNO

Nevarnost zaradi neustrezno odloženega instrumenta.

Nevarnost telesnih poškodb in okužbe zaradi vpetega svedra ali brusa. Poškodba vpenjalnega sistema zaradi izpada instrumenta.

- ▶ Po zdravljenju položite instrument brez svedra ali brusa pravilno v odlagalno mesto.



OPOZORILO

Nevarnost zaradi kontraindikacije.

Pri poškodbah mehkih delov v ustni votlini obstaja nevarnost, da zaradi stisnjenega zraka septične substance prodrejo v tkivo.

- ▶ Zdravljenja s pnevmatsko gnanim instrumentom v primeru poškodb mehkih delov v ustni votlini ne smete nadaljevati.



PREVIDNO

Nevarnost opeklin zaradi vročega pokrova instrumenta.

Pri pregrevanju instrumenta se lahko pojavijo opekline v ustnem območju.

- ▶ Z glavo instrumenta se ne dotikajte mehkega tkiva!



Za popravila in vzdrževanje izdelkov KaVo so pooblašteni

- tehniki KaVo podružnic po vsem svetu
- S strani KaVo posebno usposobljeni serviserji

Nevarnost zaradi uporabe svetlobne sonde.

Medicinskega izdelka ne smete uporabljati kot svetlobne sonde, saj vrteči sveder lahko pri tem povzroči telesne poškodbe.

- ▶ Za dodatno osvetlitev ustne votline ali mesta priprave uporabite primerno svetlobno sondo, npr. KaVo DIALux 2300L.

Za zagotavljanje brezhibnega delovanja je treba medicinski izdelek uporabljati v skladu s pripravljalnimi metodami, opisanimi v navodilu za uporabo KaVo ter upoštevati napotke za vzdrževanje in uporabo sredstev za vzdrževanje. KaVo priporoča določitev intervala vzdrževanja na podlagi interne prakse. Pri tem se medicinski izdelek s strokovnim postopkom overednoti glede čiščenja, vzdrževanja in delovanja. Ta interval vzdrževanja je odvisen od pogostnosti uporabe in ga je treba v skladu z njo tudi določiti.

Servis se lahko opravi samo v ustreznih pooblaščenih servisnih delavnicah KaVo, kjer se uporabljajo originalni rezervni deli KaVo.

Opis izdelka



GENTLEmini LUX 5000 B (Mat. št. 1.002.3300)

Tehnični podatki

Najmanjši tlak	2,1 (30) bar (psi)
Pogonski tlak	2,1 (30) do 4,2 (60) bar (psi)
Priporočilo	> 2,8 (40) bar (psi)
Poraba zraka	49 do 51 NI/min.
Število vrtljajev v prostem teku	380.000 do 450.000 min ⁻¹ (vrt./min.)
Priporočeni delovni tlak	2 (0,45) do 3 (0,68) N (lbs)

Lahko namestite na vse MULTiflex (LUX) priključke.







Pogoji za transport in shranjevanje

Nevarnost pri uporabi medicinskega izdelka po skladiščenju v močno ohlajenem stanju.

Pri tem se lahko pojavi izpad delovanja medicinskega izdelka.

- ▶ Močno ohlajene izdelke pred zagonom ogrejte na temperaturo 20 °C (68 °F) do 25 °C (77 °F).

	Temperatura: -50 °C (-58 °F) do 80 °C (176 °F)
	Relativna vlažnost zraka: brez kondenziranja
	Zračni tlak: 700 hPa (10 psi) do 1060 hPa (15 psi)
	Ščititi pred vlago.



OPOZORILO



PREVIDNO

Zagon

Nevarnost zaradi izdelkov, ki niso sterilni.

nevarnost okužbe za upravljavca in pacienta.


- ▶ Pred prvo uporabo in po vsaki uporabi medicinski izdelek sterilizirajte.

Poškodbe zaradi onesnaženega ali vlažnega zraka

Onesnažen ali vlažen hladilni zrak lahko povzroči motnje pri delovanju in predčasno obrabo ležajev.

- ▶ Na splošno je potrebno poskrbeti za suh, čist in nekontaminiran hladilni zrak v skladu z EN ISO 7494-2.

Montaža MULTiflex priključka

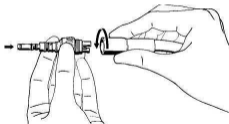

- ▶ **MULTiflex (LUX) priključek** privijte na cev turbine in trdno zategnite s ključem.

Delež vode pršila lahko regulirate z vrtenjem obroča pršila na priključku MULTiflex (LUX).



PREVIDNO

Preverite količino vode

Pregrevanje zoba zaradi premajhne količine vode.

Premajhna količina brizgalne vode lahko povzroči pregrevanje medicinskega izdelka, toplotne poškodbe pulpe in poškodbe zoba.

- ▶ Količino vode na pršilnem hlajenju nastavite na najmanj. 50 cm³/min!
- ▶ Preverite kanale brizgalne vode in po potrebi pršilne šobe očistite z iglo za šobe **Mat. št. 0.410.0931**.



Preverite tlake

Priklop na naprave

Umazan in vlažen stisnjen zrak povzroča predčasno obrabo ležajev.

- ▶ Zagotovite suh, čist in nekontaminiran stisnjen zrak v skladu z EN ISO 7494-2.

Za delovanje medicinskega izdelka je potreben pogonski tlak najmanj 2,1 (30) do 4,2 (60) bar (psi).

Medicinski izdelek samodejno zniža višji pogonski tlak.

Poraba zraka znaša 49 do 51 NI/min.

- ▶ Preskusni manometer (**Mat. št. 0.411.8731**) vstavite med cev in **MULTiflex LUX priključek** in preverite naslednje vrednosti tlaka:
 - Pogonski zrak: 2,1 (30) do 2 (60) bar (psi) (priporočeno: 2,8 (40) bar (psi))
 - Povratni zrak: < 0,5 (7) bar (psi)
 - Voda: 0,8 (11) do 2,0 (29) bar (psi)
 - Pršilni zrak: 1,0 (14) do 2,5 (36) bar (psi)



Preverjanje O-obročev

Manjkajoči ali poškodovani O-obroči

Če manjkajo O-obroči ali so poškodovani, lahko pride do motnje delovanja in predčasnega izpada.

- ▶ Preverite, če so vsi O-obroči na sklopki in če so nepoškodovani.

Število razpoložljivih O-obročev: 5



Uporaba

Navodilo

Ob začetku delovnega dneva in pred vsakim pacientom je treba izpirati vodne in zračne kanale pribl. 20 do 30 sekund.



Namestite medicinski izdelek

Poškodbe zaradi nenatančnega priklopa

Nenatančen priklop, še posebno med časom iztekanja zaradi vztrajnosti, lahko uniči visokotlačno luč priključka MULTIflex LUX ali skrajša njeno življenjsko dobo.

- ▶ S potegom preverite pravilnost naseda turbine na priključku.
- ▶ Medicinski izdelek natančno **namestite na MULTIflex LUX priključek** in ga potisnite v smeri nazaj tako, da se priključek na medicinskem izdelku slišno zaskoči.
- ▶ S potegom preverite trdnost naseda medicinskega izdelka na priključek.



OPOZORILO

Ločitev medicinskega izdelka med zdravljenjem.

Če se je medicinski izdelek nepravilno zaskočil, se lahko med zdravljenjem sname z MULTIflex (LUX) priključka.

- ▶ S potegom pred vsakim zdravljenjem preverite, ali se je medicinski izdelek pravilo zaskočil na MULTIflex (LUX) priključku.

Izvlek medicinskega izdelka

- ▶ Spojko trdno držite in izvlecite medicinski izdelek z majhnim zasukom.

Vstavite frezalna orodja ali diamantne bruse



Navodilo

Uporabljajte samo frezalna orodja iz trdin ali diamantne bruse, ki ustrezajo zahtevam po DIN EN ISO 1797-1, vrsta 3, in so izdelani iz jekla ali trdin ter izpolnjujejo naslednja merila:

- premer stebra: 1,59 do 1,60 mm
- skupna dolžina: maks. 19 mm
- vpenjalna dolžina stebra: min. 9 mm
- rezalni premer: maks. 2 mm



OPOZORILO



PREVIDNO

Uporaba nedovoljenih frezal iz trdin ali diamantnih brusov.

Telesna poškodba pacienta ali poškodba medicinskega izdelka.

- ▶ Upoštevajte proizvajalčeva navodila in frezala ali bruse uporabljajte v skladu s predvidenim namenom.
- ▶ Uporabljajte samo tista frezala iz trdin ali diamantne bruse, ki ne odstopajo od navedenih podatkov.

Telesne poškodbe zaradi uporabe obrabljenih frezal iz trdin ali diamantnih brusov.

Frezala ali brusi z obrabljenimi stebli lahko med zdravljenjem izpadejo in povzročijo telesne poškodbe.

- ▶ Upoštevajte navodila za uporabo proizvajalcev frezal ali brusov.
- ▶ Frezal in brusov z obrabljenimi stebli ne smete uporabljati. Ni dovoljeno uporabljati orodja, ki odstopa od navedenih podatkov.
- ▶ Pazite na uporabo v skladu z namenom tako, da upoštevate navodila izdelovalca frezal iz trdin ali diamantnih brusov.



PREVIDNO



PREVIDNO

Nevarnost telesnih poškodb zaradi frezal iz trdin ali diamantnih brusov.

Okužbe ali ureznine.

- ▶ Uporabljajte rokavice ali zaščito za prste.
- ▶ Gumb pritisnite krepko s palcem in hkrati vstavite sveder do omejevala.
- ▶ S potegom preverite pravilnost naseda svedra.

Nevarnost zaradi pokvarjenega vpenjalnega sistema.

Orodje lahko izpade in povzroči telesne poškodbe.

- ▶ S potegom orodja preverite brezhibnost vpenjalnega sistema in trdnost vpetja orodja. Za preverjanje, vstavljanje ter snetje uporabljajte rokavice ali naprstnik, sicer obstaja nevarnost poškodb in infekcije.



PREVIDNO



Odstranite frezalna orodja ali diamantne bruse

Nevarnost zaradi vrtečih orodij.

Ureznine.

- ▶ Vrtečega orodja se ne smete nenadzorovano dotikati.

- ▶ Po zaustavitvi frezala ali brusa s palcem močno pritisnite gumb in hkrati izvlecite frezalo ali brus.



OPOZORILO

Gumba ne pritiskajte pri vrtečem se frezalu ali brusu.

Pritisk na gumb pri vrtečem svedru ali brusu lahko poškoduje vpenjalni sistem in povzroči telesne poškodbe.

- ▶ Obvezno preprečite stik med mehkim tkivom in glavo/konico, ker se pri močnejšem segrevanju lahko pojavijo s tem povezane opekline.
- ▶ Po končanem zdravljenju snemite frezalo ali brus iz kolena. Odloženo koleno z vpetim frezalom ali brusom lahko povzroči telesne poškodbe ali okužbe.



Zamenjajte O-obroče na spojki na napajalni cevi

Nevarnost zaradi napačnega vzdrževanja O-obročev.

Pri medicinskih izdelkih se lahko zaradi napačnega vzdrževanja O-obročev pojavijo motnje delovanja ali celo popoln izpad delovanja.

- ▶ Ne uporabljajte vazeline in ostalih drugih maziv ali olj.
- ▶ O-obroč med prsti stisnite skupaj tako, da nastane zanka.
- ▶ O-obroč potisnite naprej in ga snemite.
- ▶ Nove O-obroče vstavite v zareze.




PREVIDNO

Čiščenje pršilne šobe

Nevarnost zaradi premajhne količine brizgalne vode.



Premajhna količina brizgalne vode lahko povzroči pregrevanje medicinskega izdelka in poškodbe zoba.

- ▶ Pri premajhni količini brizgalne vode očistite pršilne šobe in odstranite zamažitve ter preverite oz. zamenjajte vodni filter.

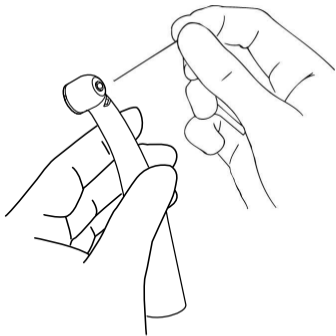

- ▶ S šobno iglo **Mat. št. 0.410.0921** zagotovite prehodnost za vodo na pršilnih šobah.

Menjava vodnega filtra

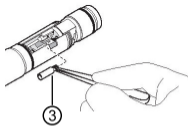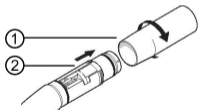

- ▶ Pušo ① v levo odvijte z nastavka ② in izvlecite.
- ▶ Vložek ② nekoliko povlecite nazaj.
- ▶ Vodni filter ③ s pinceto snemite z vložka ②.
- ▶ Vstavite nov vodni filter.
- ▶ Vložek ② ponovno potisnite nazaj.
- ▶ Pušo ① namestite na vložek ② in trdno privijte v desno.



Predpriprava na mestu uporabe

Nevarnost zaradi izdelkov, ki niso sterilni.

nevarnost okužbe za upravljavca in pacienta.

- ▶ Pred prvo uporabo in po vsaki uporabi medicinski izdelek sterilizirajte.

Nevarnost zaradi izdelkov, ki niso sterilni.

Zaradi kontaminiranih medicinskih izdelkov obstaja nevarnost okužbe.

- ▶ Zagotovite ustrezne ukrepe za zaščito oseb.

- ▶ Ostanke cementa, kompozita ali krvi odstranite že na mestu uporabe .
- ▶ Medicinski izdelek je treba v predpripravo transportirati v suhem stanju. (ne dajajte v raztopine ipd.).
- ▶ Predpriprava medicinskega izdelka naj se opravi časovno čim bližje zdravljenju.

- ▶ Rezkala iz trdin ali diamantne bruse odstranite iz medicinskega izdelka.



Čiščenje

Motnje delovanja zaradi čiščenja v ultrazvočni napravi.


Okvare na izdelku.

- ▶ Čistite samo v toplotnem razkuževalniku ali ročno!

Čiščenje: Ročno zunanje čiščenje

Potrebna oprema:

- Pitna voda $30\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ ($86\text{ °F} \pm 41\text{ °F}$) ali 60 do 70 % alkoholna raztopina.
- Ščetka, npr. srednje trda zobna ščetka

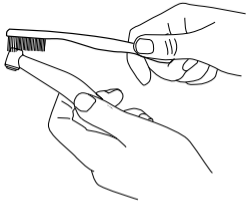

- ▶ Krtačite pod tekočo vodo ali očistite s 60 do 70 % alkoholno raztopino .

Čiščenje: Ročno notranje čiščenje

Za učinkovito ponovno pripravo je potrebno strojno notranje čiščenje s čistilno in razkuževalno napravo v skladu z ISO 15883-1.
(za ta izdelek ni predvidenega ročnega notranjega čiščenja)

Čiščenje: Strojno zunanje in notranje čiščenje

KaVo priporoča toplotne naprave za razkuževanje po ISO 15883-1, npr. Miele G 7781/ G 7881.

(opravljena je bila potrditev s programom "VARIO-TD", čistilom "neodisher® mediclean", nevtralizacijskim sredstvom "neodisher® Z" in sredstvom za izpiranje "neodisher® mielclear")

- ▶ Programske nastavitve in za uporabo predvidena čistila in razkužila boste našli v navodilu za uporabo toplotnega razkuževalnika.
- ▶ Neposredno po strojnem čiščenju medicinski izdelek obdelajte s sredstvi za vzdrževanje in nego, ki jih priporoča KaVo.



PREVIDNO


Razkuževanje

Motnje delovanja zaradi uporabe razkuževalne kopeli ali razkužila z vsebovanim klorom.

Okvare na izdelku.

- ▶ Razkužite samo v toplotnem razkuževalniku ali ročno!

Razkuževanje: Ročno zunanje razkuževanje

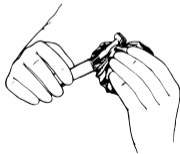

KaVo na osnovi združljivosti materiala ponuja naslednje izdelke. Mikrobiološko delovanje mora določiti proizvajalec razkužila.

- ▶ Mikrocid AF podjetja Schülke&Mayr (Liquid ali krpe)
- ▶ FD 322 podjetja Dürr
- ▶ CaviCide podjetja Metrex

Potrebna pomožna sredstva:
Krpe za brisanje medicinskega izdelka.

Razkužilo napršite na krpo, z njo obrišite medicinski izdelek in v skladu z napotki proizvajalca razkužila pustite to razkužilo delovati.

**Navodilo**

Upoštevajte navodilo za uporabo razkužila.

Razkuževanje: Ročno notranje razkuževanje

Za učinkovito ponovno pripravo je potrebno strojno notranje čiščenje s čistilno in razkuževalno napravo v skladu z ISO 15883-1.
(za ta izdelek ni predvidenega ročnega notranjega razkuževanja)

Razkuževanje: Strojno zunanje in notranje razkuževanje

KaVo priporoča toplotne naprave za razkuževanje po ISO 15883-1, npr. Miele G 7781/ G 7881.

(opravljena je bila potrditev s programom "VARIO-TD", čistilom "neodisher® mediclean", nevtralizacijskim sredstvom "neodisher® Z" in sredstvom za izpiranje "neodisher® mielclear")

- ▶ Programske nastavitve in za uporabo predvidena čistila in razkužila boste našli v navodilu za uporabo toplotnega razkuževalnika.
- ▶ Neposredno po strojnem čiščenju medicinski izdelek obdelajte s sredstvi za vzdrževanje in nego, ki jih priporoča KaVo.

Sušenje

Ročno sušenje

Za ročno sušenje se v splošnem uporablja suh, čist in neonesnažen hladilni zrak po EN ISO 7494-2.

- ▶ S stisnjenim zrakom spihajte zunanost in izpihajte notranjost tako, da ni mogoče videti nobenih vodnih kapljic.

Strojno sušenje

Praviloma je postopek sušenja sestavni del čistilnega programa toplotnega razkuževalnika.



Navodilo

Prosimo, upoštevajte navodilo za uporabo toplotnega razkuževalnika (kakovost stisnjenega zraka - glejte OPOZORILO v poglavju "Prvi zagon").

Sredstva za vzdrževanje in sistemi za vzdrževanje - Vzdrževanje



PREVIDNO



PREVIDNO

Ostro orodje v medicinskem izdelku.

Nevarnost telesnih poškodb zaradi ostrega in/ali koničastega orodja.

- ▶ Snemite orodje.

Predčasna obraba in motnje delovanja zaradi neustreznega vzdrževanja in nege.

Skrajšana življenjska doba izdelka.

- ▶ Redno izvajajte ustrezno strokovno vzdrževanje!


**Navodilo**

KaVo ne prevzema garancije za brezhibno delovanje izdelkov KaVo le ob uporabi negovalnih sredstev, navedenih v priboru KaVo, ker so bili le-ti preizkušeni v uglasenosti z našimi izdelki in za njihovo namensko uporabo.

Sredstva za vzdrževanje in sistemi za vzdrževanje - Vzdrževanje: Nega s KAVOspray-em


KaVo priporoča, da izdelek negujete 2 x dnevno (opoldan in zvečer po zaključku dela) in po vsakem strojnem čiščenju in pred vsako sterilizacijo.

- ▶ Odstranite orodje.
- ▶ Izdelek prekrijte z vrečko Cleanpac.
- ▶ Izdelek nataknite na kanilo in tipko za pršenje pritisnite za 1 sekundo.

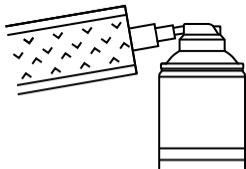

KAVOspray za vzdrževanje vpenjalnih klešč

KaVo priporoča, da vpenjalni sistem očistite oz. negujete 1 x tedensko.

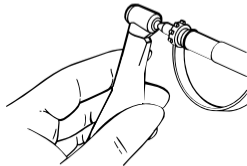


- ▶ Odstranite orodje in s konico pršilne pipice popršite v odprtino.

Navodilo

Opravite postopek vzdrževanja v skladu z opisom „Vzdrževanje s KAVO spray-em“.

Sredstva za vzdrževanje in sistemi za vzdrževanje - Vzdrževanje: Nega s KaVo SPAYrotorjem

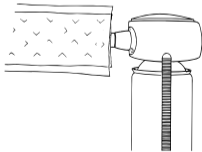

KaVo priporoča, da izdelek negujete 2 x dnevno (opoldan in zvečer po zaključku dela) in po vsakem strojnem čiščenju in pred vsako sterilizacijo.


- ▶ Izdelek namestite na primerno sklopko **KaVo SPRAYrotor** in prekrijte z vrečko Cleanpac.

- ▶ Vzdrževanje izdelka.

Glejte tudi: Navodilo za uporabo **KaVo SPRAYrotor**.

Sredstva za vzdrževanje in sistemi za vzdrževanje - Vzdrževanje: Vzdrževanje s KaVo QUATTROcare

Naprava za čiščenje in vzdrževanje z ekspanzijskim tlakom za večji učinek čiščenja in vzdrževanja.

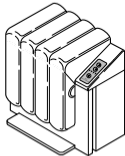

KaVo priporoča, da izdelek negujete 2 x dnevno (opoldan in zvečer po zaključku dela) in po vsakem strojnem čiščenju in pred vsako sterilizacijo.

- ▶ Odstranite orodje.

- ▶ Vzdrževanje izdelka.

Doza s pršilom KaVo QUATTROcare plus za vzdrževanje vpenjalnih klešč

KaVo priporoča, da vpenjalni sistem očistite oz. negujete 1 x tedensko.

Glejte tudi: Navodila za uporabo **KaVo QUATTROcare**.



- ▶ Odstranite orodje in s konico pršilne pipice popršite v odprtino.
- ▶ Nato obdelajte izdelek s sredstvi in sistemi za vzdrževanje, ki so opisani v nadaljevanju.



Ovojnina

Navodilo

Sterilizacijska vrečka mora biti dovolj velika za instrument tako, da ovojnina ni prenapeta.

Embalaža za predmete za sterilizacijo mora ustrezati veljavnim standardom glede kakovosti in načina uporabe ter mora prav tako biti primerna za postopek sterilizacije!

- ▶ Medicinski izdelek posamezno zavarite v embalažo za blago za sterilizacijo (nor. KaVo STERlclav vrečke **Mat. št. 0.411.9912**)!

Sterilizacija

Sterilizacija v parnem sterilizatorju (avtoklav) EN 13060 / ISO 17665-1



PREVIDNO

Predčasna obraba in motnje delovanja zaradi neprimerne nege in vzdrževanja skrajšajo življenjsko dobo izdelka.

Skrajšana življenjska doba izdelka.

- ▶ Pred vsakim sterilizacijskim ciklusom je potrebno medicinski izdelek negovati z negovalnimi sredstvi KaVo.




PREVIDNO

Kontaktna korozija zaradi vlage.

Poškodbe na izdelku.

- ▶ Izdelek po sterilizacijske ciklu nemudoma vzemite ven iz parnega sterilizatorja !

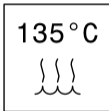

Medicinski izdelek je temperaturno obstojen do maks. 138 °C.

KaVo priporoča npr.

- STERlclave B 2200/ 2200P podjetja KaVo
- Citomat/ K-serija podjetja Getinge

Avtoklavi s trikratnim predvakuumom, najmanj 4 minute pri 134 °C ± 1
(273 °F ± 1,8)

Avtoklavi z gravitacijskim postopkom, najmanj 10 minute pri 134 °C ± 1
(273 °F ± 1,8)

Avtoklavi z gravitacijskim postopkom, najmanj 60 minute pri 121 °C ± 1
(250 °F ± 1,8)

Področje uporabe je glede na izdelovalčeva navodila za uporabo.

Shranjevanje

Pripravljene izdelke skladiščite zaščitene pred prahom v suhem, temnem in hladnem prostoru po možnosti brez prisotnosti klic.



Navodilo

Upoštevajte rok trajnosti predmetov za sterilizacijo.

Pribor

Oprema se dobavlja preko trgovin Dental-med.

Kratko besedilo o materialu	Mat. št.
Nadomestna turbina s ključem	1.006.5535
Nadomestna turbina brez ključa	1.006.4564
Vodni filter z nastavkom	1.000.4823
Stojalo za instrumente 2151	0.411.9501
Vstavek za turbine	0.411.9902
Cleanpac 10 kosov	0.411.9691
KAVOspray 2112 A	0.411.9640
ROTAspray 2 2142 A	0.411.7520
QUATTROcare plus Spray 2140 P	1.005.4525
Pršilo LIFEtime 2118 A	0.411.9700
MULTIflex pršilna glava (šoba)	0.411.9921

Kratko besedilo o materialu	Mat. št.
STERIclave vrečke	0.411.9912
Priključek za nego QUATTROcare	0.411.7991



KaVo. Dental Excellence.