
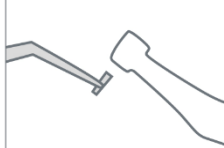

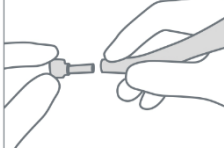





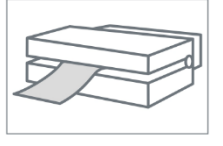
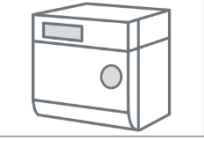




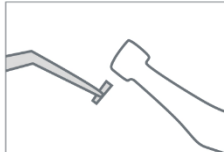

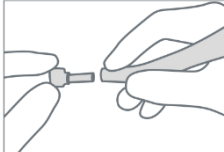







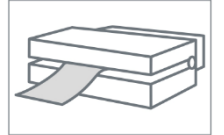
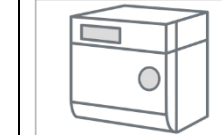





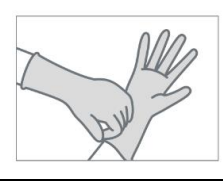
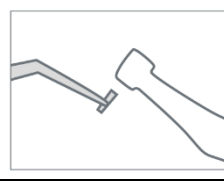
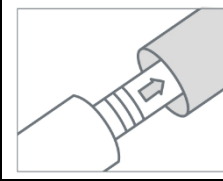
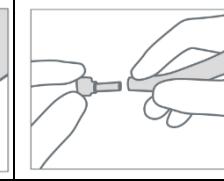
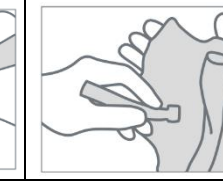
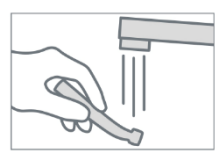

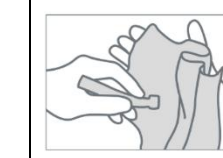
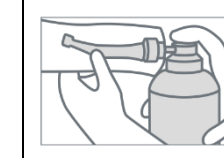

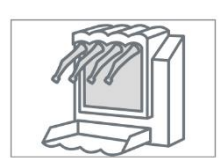


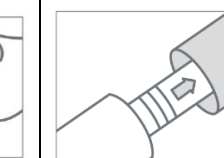
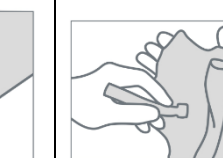
Postopek 1 - čiščenje, podmazovanje, sterilizacija

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Uporabi osebno varovalno opremo | Odstrani sveder iz instrumenta | Odstrani instrument s cevi aparata | Razstavi instrument | Obriši zunanost instrumenta |
| Rokavice, maska, očala, obleka, ... | | Kolenčnik iz mikromotorja ali turbino s spojke. | Nekateri KaVo kolenčniki se razstavijo. | KaVo priporoča dezinfekcijske robčke CaviWipes. |
|  |  |  |  |  |
| Mehansko čiščenje | Podmazovanje | Podmazovanje klešč 1 X tedensko | Odstranjevanje odvečnega olja z zunanosti instrumenta | Pakiranje v sterilizacijsko vrečko |
| Izperi instrument pod tekočo pitno vodo in ga mehansko očisti. | KaVo priporoča podmazovanje s QUATTROCARE 2124 Air aparatom ali KaVo sprejem takoj po sušenju. | KaVo priporoča uporabo KaVo spreja z INTRA nastavkom, oz. uporabo QUATTROCARE 2124 Air aparata (rdeči kolenčniki in turbine). | Uporabi običajen papir. | Vrečke so dobavljive v rolah ali kot samolepilne. Uporabi napravo za varjenje in razrez sterilizacijskih vrečk. |
|  |  | |  |  |
| Sterilizacija na 135 stopinj C | Dokumentiranje postopka | Shranjevanje | Pred uporabo | Pred uporabo |
| KaVo instrumenti, ki so primerni za sterilizacijo so označeni s simbolom. | | Shrani sterilne instrumente v suh, temen, hladen prostor, ki je zaščiten pred bakterijami in prahom. | Instrument spoji z zobnim strojem, vklopi vodo in ga aktiviraj. Pustite ga delovati nekaj sekund. | Obriši morebitno odvečno olje. |

Postopek 2 - čiščenje, termodezinfekcija, sušenje, podmazovanje, sterilizacija

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |
| Uporabi osebno varovalno opremo | Odstrani sveder iz instrumenta | Odstrani instrument s cevi aparata | Razstavi instrument | Obriši zunanost instrumenta |
| Rokavice, maska, očala, obleka, ... | | Kolenčnik iz mikromotorja ali turbino s spojke. | Nekateri KaVo kolenčniki se razstavijo. | KaVo priporoča dezinfekcijske robčke CaviWipes. |
|  |  |  |  |  |
| Mehansko čiščenje | Termodezinfekcija instrumenta | Sušenje notranjosti | Podmazovanje instrumenta | Podmazovanje klešč 1 X tedensko |
| Izperi instrument pod tekočo pitno vodo in ga mehansko očisti. | KaVo priporoča aparat po standardu ENISO 15883-1, ki deluje s čistilno tekočino, ki ima pH vrednost max. 10 stopinj. KaVo instrumenti, ki so primerni za termodezinfekcijo so označeni s simbolom. | KaVo priporoča sušilni sprej KaVo DRY ali sušilno pištolo ALPRO, takoj po termodezinfekciji. | KaVo priporoča podmazovanje s QUATTROCARE 2124 Air aparatom ali KaVo sprejem takoj po sušenju. | KaVo priporoča uporabo KaVo spreja z INTRA nastavkom, oz. uporabo QUATTROCARE 2124 Air aparata (rdeči kolenčniki in turbine). |
|  |  |  |  | |
| Odstranjevanje odvečnega olja z zunanosti instrumenta | Pakiranje v sterilizacijsko vrečko | Sterilizacija na 135 stopinj C | Dokumentiranje postopka | Shranjevanje |
| Uporabi običajen papir. | Vrečke so dobavljive v rolah ali kot samolepilne. Uporabi naprave za varjenje in razrez sterilizacijskih vrečk. | KaVo instrumenti, ki so primerni za sterilizacijo so označeni s simbolom. | | Shrani sterilne instrumente v suh, temen, hladen prostor, ki je zaščiten pred bakterijami in prahom. |
|  | | | |  |
| Pred uporabo | | | | |
| Instrument spoji z zobnim strojem, vklopi vodo in ga aktiviraj. Pusti ga delovati nekaj sekund. | | | | Obriši morebitno odvečno olje. |

Postopek 3 - čiščenje, dezinfekcija notranjosti in zunanosti, sušenje, podmazovanje

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Uporabi osebno varovalno opremo | Odstrani sveder iz instrumenta | Odstrani instrument s cevi aparata | Razstavi instrument | Obriši zunanost instrumenta |
| Rokavice, maska, očala, obleka, ... | | Kolenčnik iz mikromotorja ali turbino s spojke. | Nekateri KaVo kolenčniki se razstavijo. | KaVo priporoča dezinfekcijske robčke CaviWipes. |
|  |  |  |  |  |
| Mehansko čiščenje | Čiščenje notranjosti | Dezinfekcija zunanosti | Dezinfekcija notranjosti | Sušenje notranjosti |
| Izperi instrument pod tekočo pitno vodo in ga mehansko očisti. | KaVo CLEANspray 2110 pošlji v notranjost instrumenta 3 x 2 sekundi in pusti 1 minuto da učinkuje. | KaVo priporoča dezinfekcijske robčke CaviWipes. | KaVo priporoča dezinfekcijski sprej ALPRO WL-cid. | KaVo priporoča sušilni sprej KaVoDRY ali sušilno pištolo ALPRO, takoj po termodezinfekciji. |
|  |  |  |  |  |
| Podmazovanje | Podmazovanje klešč 1 X tedensko | Dokumentiranje postopka | Pred uporabo | Pred uporabo |
| KaVo priporoča podmazovanje s QUATTROCARE 2124 Air aparatom ali KaVo sprejem takoj po sušenju. | KaVo priporoča uporabo KaVo spreja z INTRA nastavkom, oz. uporabo QUATTROCARE 2124 Air aparata (rdeči kolenčniki in turbine). | | Instrument spoji z zobnim strojem, vklopi vodo in ga aktiviraj. Pustite ga delovati nekaj sekund. | Obriši morebitno odvečno olje. |

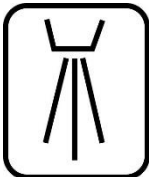
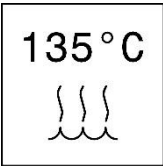
Navodila so sestavljena po trenutno dostopnih podatkih, se stalno dopolnjujejo in so objavljena na naši spletni strani www.strazisar.si.

Uporabljeni viri:

- navodila za uporabo in vzdrževanje KaVo Dental, ki upoštevajo smernice RKI - Robert Koch Institute,
- postopek 2 in 3 sta narejena po zaporedju, ki sledi napatkom RKI Nemčija.

Sredstva in oprema potrebna za posamezne korake - pokličite za ponudbe

| | | | |
|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| CaviWipes Dezinfekcijski robčki | Ploščato pakiranje | Pakiranje v valju - BOX | |
| KaVo Spray | Nastavek za podmazovanje MULTIflex | Nastavek za podmazovanje INTRA | Nastavek za podmazovanje COMFORTdrive |
| KaVo CLEANspray | Nastavek za čiščenje MULTIflex | Nastavek za čiščenje INTRA | Nastavek za čiščenje COMFORTdrive |
| ALPRO WL -Cid Sprej za dezinfekcijo notranjih vodov instrumenta | Nastavek za dezinfekcijo INTRA | Nastavek za dezinfekcijo MULTIflex | |
| ALPRO ročka za izpihovanje - sušenje po dezinfekciji | | | |
| KaVo DRYspray | Nastavek za sušenje MULTIflex | Nastavek za sušenje INTRA | Nastavek za sušenje COMFORTdrive |
| KaVo Cleanpack | PVC vrečka z pivnikom omogoča čisto in pregledno nego instrumentov | | |
| KaVo 2151podstavek za shranjevanje instrumentov | | | |
| KaVo Aparat za strojno podmazovanje QUATTROCARE 2124 Air | Aparat je trenutno v akcijski ponudbi | | |
| KaVo QUATTROCARE spray | Sprej za uporabo v aparatu | Nastavek za podmazovanje klešč | |
| Miele termodezinfektor - 3 modeli | | | |
| EURONDA Eurosafe 60 termodezinfektor | | | |
| EURONDA vrečke za sterilizacijo | Samolepilne vrečke | | |
| EURONDA naprave za varjenje in razrez (4 modeli) | Vrečke v rolah različnih dimenzij - 8 različnih širin | | |
| EURONDA autoklav | V ponudbi 8 različnih modelov | | |
| EURONDA Infection control zaščitna oprema – plašč, kapa, rokavice, maska, očala, vizir... | | | |

| | |
|--|--|
| Simbol: primerno za termodezinfekcijo  | Simbol: primerno za sterilizacijo  |
|--|--|

POMEMBNO!

KaVo instrumentov ne namakati v dezinfekcijskem sredstvu.

KaVo instrumentov ne čistiti s pomočjo ultrazvočnih banjic.

Preberite in upoštevajte navodila za uporabo.